

EVOLVEO

FitBand B3

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybral zařízení EVOLVEO FitBand B3.

Začínáme

Vítejte ve světě B3, ve světě náramku s barevným displejem, který vás motivuje k dosažení vašich cílů ve velkém stylu.

Balení B3 obsahuje:

Jednotku B3 a 2 náramky

Zařízení B3 se skládá ze dvou částí: z jednotky B3 a náramku. Náramky v dalších barvách se prodávají samostatně.

Nastavení náramku B3

Začneme vytvořením vašeho účtu v aplikaci EVOLVEO Fit a ujištěním, že jednotka B3 dokáže přenést shromážděná data do dashboardu aplikace. Dashboard je místo, ve kterém si nastavíte vaše cíle, analyzujete údaje z minulosti. Identifikujte trendy, držte krok s přáteli a mnohem více. Hned jak dokončíte nastavení náramku, jste připraveni začít se hýbat.

Váš účet jednotky B3 požaduje informace jako výška, váha a pohlaví, aby mohl provést nejrůznější výpočty. Vaše jméno a průměrný denní počet kroků jsou v rámci výchozího nastavení viditelné pro všechny přátele B3.

Nastavení jednotky B3 na vašem mobilním zařízení

Volně dostupná aplikace EVOLVEO Fit je kompatibilní s iOS 8.0 nebo vyšší verzí a s Androidem 4.4 nebo vyšší verzí, s více než 150 operačními systémy pro mobilní zařízení.

APLIKACE KE STAŽENÍ



EVOLVEO Fit



EVOLVEO Fit


1. V závislosti na vašem zařízení najdete na jednom z těchto míst aplikaci EVOLVEO Fit.
 - v Apple APP STORE pro zařízení s iOS (iPhone)
 - v Google PLAY STORE pro zařízení s Androidem

Podpora:

BT4.0 kompatibilní s iOS 8.0 nebo vyšší a Androidem 4.4 nebo vyšší

2. Nainstalujte aplikaci, otevřete ji, registrujte se a přihlaste se do účtu a aplikace vás provede řadou instrukcí.
3. Pokračujte podle uvedených instrukcí a připojte nebo spárujte jednotku B3 s vaším mobilním zařízením. Párováním se ujistíte, že jednotka B3 spolu s mobilním zařízením mohou vzájemně komunikovat (synchronizace dat tam a zpět).

Klikněte na aplikaci -> Zařízení -> zvolte EVOLVEO FitBand B3

4. Jakmile se na náramku objeví , dlouze stiskněte dotykovou oblast a potvrďte, v aplikaci stiskněte volbu Párovat.
(Poznámka: pokud se uživateli iOS nepodaří náramek FitBand B3 spárovat, zkontrolujte nastavení telefonu --- Bluetooth -> FitBand B3 -> Zapomenout toto zařízení.)

Použití dotykového displeje




Výměna náramku

Náramek obsahuje dvě samostatné části (jednotku B3 a pásek), přičemž pásek se prodává samostatně a můžete ho libovolně měnit.

Vyjmutí náramku

Vyjmutí náramku:

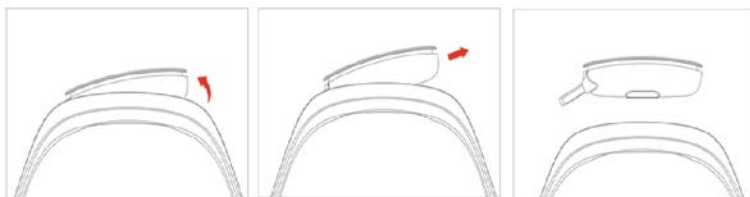

Pokyny k nabíjení



Je podporována pouze 5V USB nabíječka!
Nepoužívejte USB nabíječku s jiným napětím.

Pokud je baterie téměř vybitá, po několika sekundách od probuzení jednotky B3 se zobrazí ikona vybité baterie.

Poznámka: Předtím, než začnete jednotku B3 nabíjet, se ujistěte, že tělo jednotky je suché a není v blízkosti kapalin, jako jsou nápoje, voda apod. V opačném případě může snadno dojít ke zkratu.

Úroveň baterie můžete sledovat kdykoliv přímo na vaší jednotce B3 nebo prostřednictvím aplikace EVOLVEO Fit.



Nabíjení jednotky:

Do USB portu na počítači nebo CE/UL zasuněte autorizovanou USB nabíječku.

Na displeji jednotky B3 uvidíte ikonu baterie. Ikona baterie po 3 sekundách zmizí.



Plné nabití trvá asi 1-2 hodiny. Zatímco se jednotka nabíjí, můžete poklepáním zkontrolovat úroveň nabití baterie. Plně nabitá jednotka zobrazuje ikonu nabité baterie.

*Poznámka: Při nabíjení prostřednictvím počítače se ujistěte, že displej jednotky směřuje dolů.

Automatické sledování s B3

Jednotka B3 nepřetržitě sleduje různé stavy, kdykoliv máte náramek na sobě. Informace se přenáší do dashboardu aplikace pokaždé, kdy obě zařízení synchronizujete.

Zobrazení celodenního stavu, poklepejte na jednotku a zobrazte následující celodenní stavy:

- Kroky
- Tepová frekvence
- Krevní tlak
- Ušlá vzdálenost
- Spálené kalorie

V aplikaci EVOLVEO Fit naleznete další informace zaznamenané vaší jednotkou B3, jako je

- počasí
- historie spánku, včetně počtu hodin a kvality spánku
- tepová frekvence (BPM), průměrná klidová tepová frekvence a dynamická tepová frekvence za 15/30/60/120 minut v závislosti na vašem nastavení
- historie cvičení
- dálkové ovládání spouště fotoaparátu
- alarm
- výzva k aktivitě
- antilost alarm

Poznámka: o půlnoci se stav B3 jednotky resetuje a zahajuje nový den.



Seznámení se s ovládáním obrazovky

Přejeďte prstem nahoru/dolů
Změna režimu / probuzení obrazovky



Stiskněte a podržte na 3 sekundy
Vstup na testovací stránku



Stiskněte a podržte na 3 sekundy
Návrat do hlavního rozhraní



Dotkněte se obrazovky
Klikněte na obrazovku a zkontrolujte stav

Měření krevního tlaku

Příprava před zahájením měření

Abyste zajistili přesné měření prostřednictvím systému měření tlaku FitBand B3, dodržujte následující pokyny:

1. 30 minut před zahájením měření se nekoupejte, nekuřte, necvičte, nepijte alkohol, kofein ani nejezte.
2. Stres může způsobit zvýšení krevního tlaku, proto se vyvarujte měření během stresových situací.
3. Měření by se mělo provádět na klidném místě. Posadte se na židli s chodidly položenými na podlaze. Posadte se rovně a záda a ruku si opřete o opěrku. Zůstaňte v klidu a během měření nemluvte.

Zahájení měření krevního tlaku

1. Vstupte do rozhraní Krevního tlaku.



Dlouze stiskněte tlačítko a poté jednotka B3 zahájí měření. Na testovaný prst příliš netlačte ani se jím nedotýkejte obrazovky příliš lehce.

2. Po několikasekundovém měření se na displeji jednotky B3 následujícím způsobem zobrazí výsledek.



3. Pokud jsou výsledky příliš odlišné (>10 mmgh), měření opakujte.

*Jednotka B3 není určena jako lékařské/diagnostické zařízení. Slouží pouze k monitorování vývoje krevního tlaku pro vaši osobní potřebu.

Není-li k dispozici žádný výsledek měření krevního tlaku, nejpravděpodobnějšími příčinami jsou:

1. Nedošlo ke správnému kontaktu optického senzoru s kůží testovaného prstu.
2. Testovaná ruka/prst je příliš studená vlivem nedostatečné cirkulace.

Na základě výše uvedených důvodů navrhujeme následující řešení:

- (1) Metoda 1: Zatlačte silněji palcem jedné ruky na obrazovku jednotky B3, aby se zlepšil kontakt optického senzoru s pokožkou testovaného prstu.
- (2) Metoda 2: Zlepšete periferní cirkulaci krve v testované ruce/prstu. Pokud máte často studené ruce/prsty nebo špatnou cirkulaci, zkuste několik minut ruku procvičovat, abyste před měřením zvýšili krevní oběh.

Postup procvičení ruky:

Krok 1: Držte ruce před sebou a zatřeste jimi, abyste zvýšili průtok krve.

Krok 2: Sevřete ruce v pěst a 10 sekund je nechte sevřené, poté uvolněte.

Krok 3: Toto cvičení několikrát zopakujte.

Během cvičení doporučujeme použít poddajný předmět, jako je gumový míček nebo posilovací kleště.

Aktualizace jednotky B3

Zlepšení funkcí a vylepšení produktů jsou volně přístupná prostřednictvím aktualizací firmwaru. Doporučujeme jednotku B3 aktualizovat včas.

Jakmile je k dispozici aktualizace firmwaru, v aplikaci **EVOLVEO Fit --- Zařízení---**

Aktualizace firmwaru se zobrazí červená tečka, která vás k aktualizaci vyzve. Jakmile se aktualizace spustí, v aplikaci EVOLVEO Fit i na jednotce B3 se zobrazí ukazatel průběhu, dokud se aktualizace nedokončí.

Během aktualizace udržujte náramek a mobilní zařízení ve vzájemné blízkosti.

Poznámka: aktualizace jednotky B3 trvá několik minut a může zatěžovat baterii. Proto doporučujeme aktualizaci provádět, jakmile je jednotka B3 plně nabitá.

Vypnutí a tovární nastavení

Chcete-li zařízení vypnout, postupujte následovně. Nastavte obrazovku do výchozího zobrazení, tj. zobrazení data a času. Stiskněte a podržte displej po dobu asi 2 sekund, dokud se neobjeví malá číslice „1“. Opět stiskněte a podržte displej na 2 sekundy, dokud se neobjeví malá číslice „2“. Dalším stisknutím na 2 sekundy se objeví symbol číslice „3“. Zopakujte postup počtvrté a na displeji se zobrazí symbol „off“ (vypnuto). Nakonec stiskněte a podržte displej po dobu 2 sekund ještě jednou a jednotka se vypne.

Chcete-li jednotku přepnout do továrního nastavení, postup opakujte, ale v posledním kroku displej stiskněte jen krátce a objeví se tovární nastavení. Poté opět stiskněte a podržte displej na 2 sekundy a jednotka se přepne do továrního nastavení. Veškeré naměřené údaje budou smazány a náramek začne měřit od nuly. Třetí funkce následující po továrním nastavení je pro kontrolu vibrací. Lze ji opakovaně aktivovat podržením displeje po dobu 2 sekund.

Specifikace

Hmotnost	21 g
Baterie	Poly-Li
Bluetooth	BT 4.0
Displej	0,96“ IPS obrazovka
Ovládání	Dotyková plocha
Bluetooth signál	8-10 m
Vodotěsnost	3 ATM

Řešení problémů s jednotkou B3

Chybí signál tepové frekvence

Jednotka B3 nepřetržitě sleduje vaši tepovou frekvenci během cvičení a po celý den. Občas může mít jednotka problém s hledáním dobrého signálu. Pokud k tomu dojde, na místě, kde se obvykle zobrazuje vaše tepová frekvence, se objeví přerušovaná čára.

- Pokud náramek nesnímá tepovou frekvenci, nejprve zkontrolujte, že je náramek správně nasazený. Posuňte ho na zápěstí nahoru či dolů nebo utáhněte či povolte pásek.
- Poté na chvíli držte ruku v klidu a rovně a tepová frekvence by se měla opět objevit.

- Pokud snímání tepové frekvence stále nefunguje, zkontrolujte nastavení tepové frekvence ve vaší aplikaci a ujistěte se, že je funkce nastavena do režimu On (Zapnuto) nebo Auto.

Neočekávané chování

Pokud se stane, že mobilní zařízení nelze s náramkem spárovat, přejděte do **nastavení Bluetooth**. Pokud na telefonu vidíte signál jednotky B3, znamená to, že signál Bluetooth správně funguje. Zkontrolujte, zda je zařízení spárováno s jiným mobilem. Pokud ano, spárování prostřednictvím aplikace zrušte. Pro iOS bystě měli podniknout ještě jeden krok. Přejděte do **Nastavení telefonu --- Bluetooth --- Zapomenout zařízení** a poté znovu spárujte.

Ustanovení o výjimce

1. Data naměřená jednotkou B3 o tepové frekvenci a krevním tlaku nejsou určena k lékařské diagnóze.
2. Samodiagnostika a samoléčba jsou nebezpečné, pouze kvalifikovaný lékař může určit diagnózu a léčit vysoký krevní tlak či jiná srdeční onemocnění. Pro podrobnější diagnózu kontaktujte svého lékaře.
3. Data o tepové frekvenci a krevním tlaku naměřená prostřednictvím jednotky B3 nemusí být zcela přesná a vlivem různých faktorů mohou překročit toleranci, jak je uvedeno ve specifikaci výše. Důvodem může být interference se signálem z vnějších zdrojů, nošení náramku v nesprávné poloze, změny počasí nebo změna kondice uživatele.
4. Neupravujte medikaci ani postup léčby na základě měření jednotky B3. Před zahájením jakékoliv léčby nebo užívání léků se řiďte pokyny lékaře.

ZŘÍKÁME SE VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z TAKOVÉHO NESPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ A NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKY POUŽITÍ TAKOVÝCHTO DAT A INFORMACÍ.

Záruční podmínky

Záruční doba jednotky B3 jsou 2 roky od data zakoupení. Pokud je za normálního používání výrobek vadný nebo poškozený, což může být potvrzeno technickým pracovníkem autorizovaným naší společností, společnost poskytne bezplatnou opravu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Nejprve si přečtete „FAQ - často kladené otázky“ na adrese:

www.evolveo.com/cz/fitband-b3 nebo kontaktujte technickou podporu společnosti EVOLVEO.

EVOLVEO - TECHNICKÁ PODPORA

www.evolveo.com/cz/podpora

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- mechanické poškození způsobené nesprávným použitím
- poškození způsobené připojením k neoprávněnému zařízení nepodporující výrobek
- šmouhy na výrobku způsobené umělým nebo náhodným poškozením
- škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou
- pokles kapacity baterie po 6 měsících používání (6 měsíců záruka na výdrž baterie)
- běžné stárnutí výrobku během jeho životnosti
- škody způsobené jiným zásahem



Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech připomíná, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

① CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO FitBand B3 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Všechna práva vyhrazena.

Konstrukce a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.